

7. Risoluzione dei problemi

In caso di specifici problemi del dispositivo, un codice errore verrà visualizzato sul display. Di seguito viene riportata una spiegazione del contenuto dell'errore con relative cause e risoluzioni.

Codice di errore	Causa	Risoluzione
	Il controller direzionale è stato deviato quando il bracciolo è stato ruotato verso l'alto.	Abbassare il bracciolo e riacendere il dispositivo.
	Il controller direzionale non era in posizione neutra quando il dispositivo è stato acceso.	Riacendere il dispositivo senza toccare il controller direzionale.
	I freni sono stati rilasciati.	Bloccare i freni.
	Il cavo del caricabatterie CC è stato collegato al dispositivo mentre questo era ancora acceso, o il dispositivo è stato acceso durante la ricarica.	Scollegare il cavo connettore CC dal dispositivo.
	Batteria scarica.	Ricaricare la batteria.
	La limitazione della velocità è stata attivata dopo che la temperatura della batteria è scesa in modo significativo.	Conservare la batteria a una temperatura ambiente superiore a 0 °C fino a quando la temperatura della batteria si alza al di sopra di 0 °C.
	La limitazione della velocità è stata disattivata dopo che la temperatura della batteria è salita oltre lo 0 °C.	La limitazione della velocità a causa della bassa temperatura della batteria è stata disattivata.
	Il dispositivo potrebbe trovarsi su una pendenza di 10° o più. È necessario valutare le condizioni reali e utilizzare questo codice di errore solo come indicazione.	Spostarsi lentamente con cautela in una posizione in cui l'angolo di inclinazione è di 10° o meno.

320-07233 06/18



Model C

Veicolo elettrico personale intelligente



Montaggio

1

Operazioni di base

2

App per iPhone

3

Modalità ruote libere

4

Ricarica della batteria

5

Smontaggio

6

Risoluzione dei problemi

7



Questo documento non sostituisce il manuale utente. Leggere il manuale utente prima dell'uso.

1. Montaggio

Cesto portaoggetti (se acquistato)



1 Collegamento della base unità posteriore alla base unità anteriore



Afferrare la maniglia A e allineare la maniglia B con il gancio sulla base unità posteriore. Inclinare lentamente in avanti la base unità posteriore per collegarla alla base unità anteriore. Quando le due parti sono collegate correttamente si sentirà un clic.



Accertarsi che la barra anti-ribaltamento sia abbassata.

2 Montaggio del cesto portaoggetti (se acquistato)




Allineare il cesto portaoggetti con i ganci sulla base unità posteriore. Fissare il fermo del gancio sulla parte inferiore del cesto portaoggetti al fermo dell'anello sulla base unità anteriore.

3 Montaggio del gruppo del sedile



Rimuovere il cuscino e sollevare il gruppo del sedile per i braccioli.

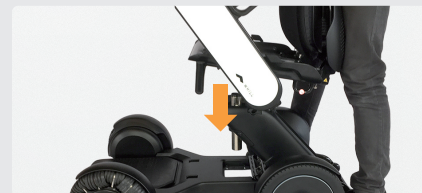

Utilizzare il foro vista per allineare e posizionare il gruppo del sedile sul supporto del sedile. Tirare verso il basso la leva di rilascio del sedile e fissare la parte posteriore del cuscino al telaio della sedia.

4 Montaggio della batteria



Afferrare la maniglia della batteria e allineare la batteria con le linguette nella parte inferiore dell'alloggiamento della batteria. Premere sulla batteria per inserirla. La luce posteriore si accenderà e si spegnerà. Finito!

! Accertarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso.



2. Operazioni di base

! Accertarsi di spegnere il dispositivo prima di entrare o uscire dal dispositivo.

Tastiera di comando Gruppo controller direzionale

Display

Il livello di carica della batteria è visualizzato da 0% a 100%

Aumento/Diminuzione della velocità


Segnalatore acustico per indicare la vostra presenza

Pulsante di alimentazione

Controller direzionale

- 1 Posizionamento** Assicurarsi che il display sia spento prima di sedersi.
- 2 Accensione** Verificare che il display si accenda quando si preme il pulsante di alimentazione.
- 3 Guida** Premere lentamente il controller direzionale nella direzione in cui si desidera spostarsi.
- 4 Arresto** Per arrestare il dispositivo, togliere la mano dal controller direzionale.
- 5 Spegnimento** Verificare che il display si spenga quando si preme il pulsante di alimentazione.
- 6 Uscita** Accertarsi che l'alimentazione sia disattivata (il display è spento) prima di uscire dal dispositivo.

3. App per iPhone

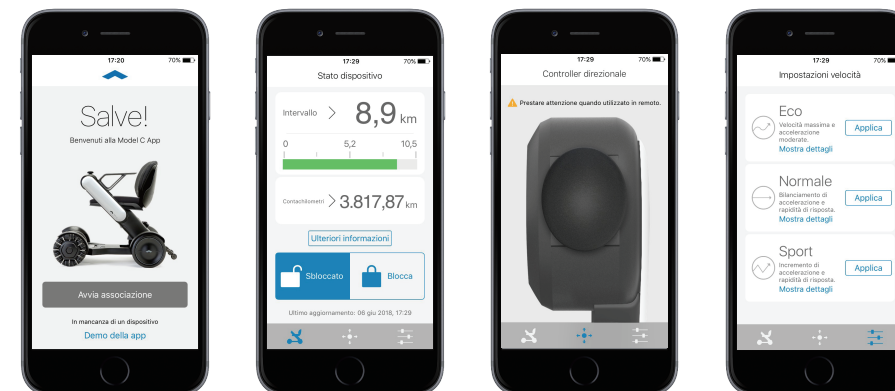

1. Scaricare l'app WHILL Model C dall'Apple App Store.
2. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sull'iPhone.
In questo modo è possibile collegare l'iPhone al dispositivo Model C.
3. Aprire l'app e immettere l'ID di login e la password dell'app.
4. Premere Connetti, quindi iniziare la guida in remoto o configurare le impostazioni di velocità.

4. Modalità ruote libere

Per spostare manualmente il dispositivo Model C, spingere verso il basso le leve rosse di rilascio del freno su entrambi i lati. La modalità ruote libere può essere utilizzata quando la batteria del Model C è scarica o altrimenti inutilizzabile.



! Non rilasciare i freni su superfici inclinate.
Accertarsi di essere su una superficie piana prima di rilasciarli.

5. Ricarica

1 Ricarica della batteria mentre è installata nel dispositivo

Spostare il veicolo vicino a una presa a muro e spegnerlo.

Collegare il caricabatterie a una presa a muro standard.
Accertarsi che la spia del caricabatterie sia accesa e di colore rosso.

Aprire il coperchio e inserire il connettore nella porta del caricabatterie.
La ricarica inizia quando la spia del caricabatterie lampeggia in verde.

La batteria è completamente carica quando la spia verde smette di lampeggiare e resta accesa.

Scollegare il connettore e chiudere il coperchio della porta del caricabatterie.

2 Ricarica della batteria quando non installata nel dispositivo

Staccare la batteria dal dispositivo.

Collegare il caricabatterie a una presa a muro standard.
Accertarsi che la spia del caricabatterie sia accesa e di colore rosso.

Aprire il coperchio e inserire il connettore nella porta del caricabatterie. La ricarica inizia quando la spia del caricabatterie lampeggia in verde. A questo punto, anche l'indicatore di carica sul lato della batteria lampeggerà per indicare lo stato di ricarica in corso.

La batteria è completamente carica quando la spia verde smette di lampeggiare e resta accesa. L'indicatore del livello di carica della batteria si spegnerà. Per controllare la carica residua della batteria, spingere il pulsante del livello di carica della batteria.

Scollegare il connettore e chiudere il coperchio della porta del caricabatterie.
Rimontare la batteria sul dispositivo.



6. Smontaggio per la conservazione o il trasporto


1 Rimozione della batteria



Rimuovere la batteria afferrando la relativa maniglia e tirando verso di sé.

! Verificare che la batteria non sia bloccata.

2 Rimozione del sedile

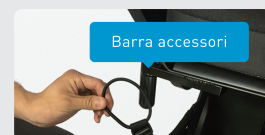

Staccare il gancio del cesto portaoggetti (se acquistato) da ogni barra accessori.



Tirare la leva di rilascio del sedile verso di sé.



Afferrare i braccioli e sollevare il gruppo del sedile vero l'alto allontanandolo dalla base unità posteriore. Appoggiare a terra il gruppo del sedile.

3 Rimozione del cesto portaoggetti (se acquistato)

Sollevare il cesto portaoggetti e staccare il fermo del gancio dal fermo dell'anello sulla base unità anteriore. Far ruotare il cesto in avanti tenendolo sollevato e staccarlo dalla base unità posteriore.

4 Rimozione della base unità anteriore



Tirare la leva di rilascio della base verso di sé.



Afferrare la maniglia A e separare la base unità anteriore dalla base unità posteriore.

Come tenere ciascun componente:



Base unità anteriore: maniglia all'estremità della pedana e maniglia A



Base unità posteriore: una maniglia sull'alloggiamento della batteria e la barra anti-ribaltamento

* Sostenere la base unità posteriore con la mano mentre la si stacca per accertarsi che non si ribalti.