



WHILL

WHILL Model C2/CK2 お客様向け取扱マニュアル

WHILL Model C/CKで航空機を利用する際のお客様向けマニュアルです。航空機利用時にご確認ください。

出発時 航空会社係員への引き渡しについて


1



電源を切る

電源を切って、両側のアームを跳ね上げてください。

2

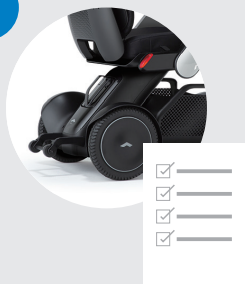

破損の防止

輸送中に破損が発生した場合に備えて、機体の写真を撮影することをお勧めします。傷を防ぐため、アーム部分を緩衝剤で包むよう係員に伝えてください。

3



バッテリーの取り外し

規定に従いバッテリーはお客様とともに客室に持ち込み、安全に保管してください。短絡が生じないように絶縁物を使用して端子を保護してください。

到着時 受け取りと運転について

1



検査

本体を受け取ったら、点検してください。輸送中に発生したと思われる損傷があった場合は、写真を撮り損傷内容を航空会社にお問い合わせください。

2



ブレーキを確認

ブレーキがロックされていることをご確認ください。シート下にある赤いブレーキ解除レバー（左右2カ所）が上がっていればロックされています。

3



運転

シートに座り、アームを下げます。電源が入ることを確認してください。

その他

WHILL Model C2/CK2のリチウムイオンバッテリーは、UN Manual of Test and Criteria, Part III, Section 38.3の各試験要件に合致しています。予備バッテリー1つまで追加して客室持ち込みが可能です。充電器は、客室持ち込み、もしくは預かり手荷物（スーツケース等）に収納して預けることが可能です。

本情報は以下の規定に基づいており、規定が改定された場合にはこの限りではありません。

IATA DANGEROUS GOODS REGULATION 規定 2.3「旅客または乗員が携行する危険物」2.3.2「運航者の承認を得て、受託手荷物として受託可能な物品」2.3.2.4「リチウム電池を装備した車椅子/移動補助機器」



WHILL

WHILL Model C2/CK2 航空会社向け取扱マニュアル

航空会社係員が WHILL Model C/CK を適切に取り扱うためのマニュアルです。車椅子預かりの際に航空会社係員にお渡しください。



分解時の重量

シート部: 約 12.2kg
メインボディ部 (後輪): 約 19.4kg
ドライブベース部 (前輪): 約 17.6kg
バッテリー: 約 2.7kg

分解時のサイズ (長さ×幅×高さ)

シート部: 約 57cm × 約 55cm × 約 48cm
メインボディ部: 約 59cm × 約 55cm × 約 30cm
ドライブベース部: 約 72cm × 約 55cm × 約 27cm



バッテリー

タイプ: リチウムイオンバッテリー
容量: 10.6Ah
電圧: 25.3 V/269 Wh
取り外し: 可 (客室内で保管)
個数: 1個

・WHILL Model C2/CK2のリチウムイオンバッテリーは、UN Manual of Test and Criteria, Part III, Section 38.3の各試験要件に合致しています。
・ガスを発生しない構造です。

1



ブレーキを解除する

手で押して移動させる際は、本体の電源を切り、シート下にある赤いブレーキ解除レバー (左右2カ所) を押し下げてください。

2



持ち上げる

持ち上げる際は、前方のフットサポートのハンドルと、後方の転倒防止バーを使用してください。

3



ブレーキをロックする

貨物室に到着したら、シート下にある赤いブレーキ解除レバー (左右2カ所) を押し上げてください。ブレーキがロックされ、飛行中に本体が動くことを防ぎます。

4



ベルトやフックで固定する

ベルトやフックで固定する場合は、アクセサリポスト (前方2カ所) と、Dリング (後方2カ所) をご使用ください。その他の箇所へフック等をかけると、変形や傷の原因になることがあります。

目的地に到着したら、ブレーキをロックして安全にお客様に返却してください。

本情報は以下の規定に基づいており、規定が改定された場合にはこの限りではありません。

IATA DANGEROUS GOODS REGULATION 規定 2.3「旅客または乗員が携行する危険物」2.3.2「運航者の承認を得て、受託手荷物として受託可能な物品」2.3.2.4「リチウム電池を装備した車椅子 / 移動補助機器」