



WHILL Model F お客様向け取扱マニュアル

WHILL Model Fを航空機で利用する際のお客様向けマニュアルです。航空機利用時にご確認ください。本書の内容を、ご自宅で事前に確認することをお勧めします。

出発時 航空会社係員への引き渡しについて

1



バッテリーを抜く

電源を切ってください。
電源の切れたことを確認し、
バッテリーを抜いてください。

2



機体のチェック

輸送中に破損が発生した場合
に備えて、機体の写真を撮影す
ことをお勧めします。

3



折りたたむ

ロック解除スイッチを押して本
体を折り畳んでください。傷を防
ぐため、コントローラーとアーム
レストを緩衝材で包むように航
空会社係員へお伝えください。



折りたたみ
方法動画



到着時 受け取りと運転について

1



折りたたみを解除する

シートフレームパイプを軽く上
に持ち上げながら、ロック解除
スイッチを押して、WHILLを
乗れる状態にしてください。
バッテリーを挿入してください。

2



ブレーキを確認

輸送中に発生した損傷が無い
か点検してください。気になる
点がありましたら、写真を撮り、
航空会社へお問合せください。
左右のブレーキがロックされて
いることを確認してください。

3



運転

シートに座り、乗り心地におかし
なところが無いか確認してくだ
さい。電源を入れることを確認して
ください。

その他

WHILL Model Fのリチウムイオンバッテリーは、UN Manual of Test and Criteria, Part III, Section 38.3の各試験要件に合致しています。

予備バッテリー1つまで追加して客室持込が可能です。充電器は、客室持ち込み、もしくは預かり手荷物【スーツケースなど】に収納して預けることが可能です。

コントローラーの破損を避けるため、コントローラーを取り外していただくことも可能です。外したコントローラーは手荷物として機内に持ち込んでください。取扱説明書の91ページをご参照ください。

本情報は以下の規定に基づいており、規定が改訂された場合にはこの限りではありません。

IATA DANGEROUS GOODS REGULATION 規定 2.3 「旅客または乗員が携行する危険物」 2.3.2 「運航者の承認を得て、受託手荷物として受託可能な物品」 2.3.2.4 「リチウム電池を装備した車椅子 / 移動補助機器」



WHILL Model F 航空会社向け取扱マニュアル

航空会社係員がWHILL Model Fを適切に取り扱うためのマニュアルです。WHILL Model Fをお預けする際に航空会社係員にお渡しください。



展開時の寸法と重量

長さ: 約94cm
幅: 約61cm
高さ: 約80cm
重量: 約24kg (バッテリー含まず)



バッテリー

タイプ: リチウムイオンバッテリー
容量: 10.6Ah
電圧: 25.3V/269Wh
取り外し: 可能(客室内で保管)
個数: 1個

- ・WHILL Model FのリチウムイオンバッテリーはUN Manual of Test and Criteria, Part III, Section 38.3の各試験要件に合致しています。
- ・ガススプリングは不使用です。

本情報は以下の規定に基づいており、規定が改訂された場合にはこの限りではありません。
IATA DANGEROUS GOODS REGULATION 規定 2.3 「旅客または乗員が携行する危険物」 2.3.2 「運航者の承認を得て、受託手荷物として受託可能な物品」 2.3.2.4 「リチウム電池を装備した車椅子 / 移動補助機器」



固定用フックはありません。折り畳んで横に寝かせて保管してください。