

WHILL Model C/CK を航空機に載せる際の注意点

2017/09/06 作成

この書面は WHILL Model C/CK を航空機に載せる際に必要とされる、下記の情報をまとめています。航空機に Model C/CK ご利用で搭乗する際は、この書面を航空会社係員にお見せいただくと手続きがスムーズです。

- ① 車いすの仕様
- ② バッテリーの仕様
- ③ 手動への切り替え方法
- ④ 固縛方法


《車いすお預け時の注意》

規定に従いバッテリーはお客様とともに客室に持ち込み、安全に保管してください。

本体にバッテリー取り付けのまま預けてしまった場合、海外では本人に確認なくバッテリーを廃棄されたケースがあります。

特にバッテリーのカギをご使用のお客様は、必ずカギをお持ちいただくか、開錠してください。カギを開錠できない場合、搭乗不可になる可能性があります。

詳しくは航空会社に確認し、指示に従ってください。

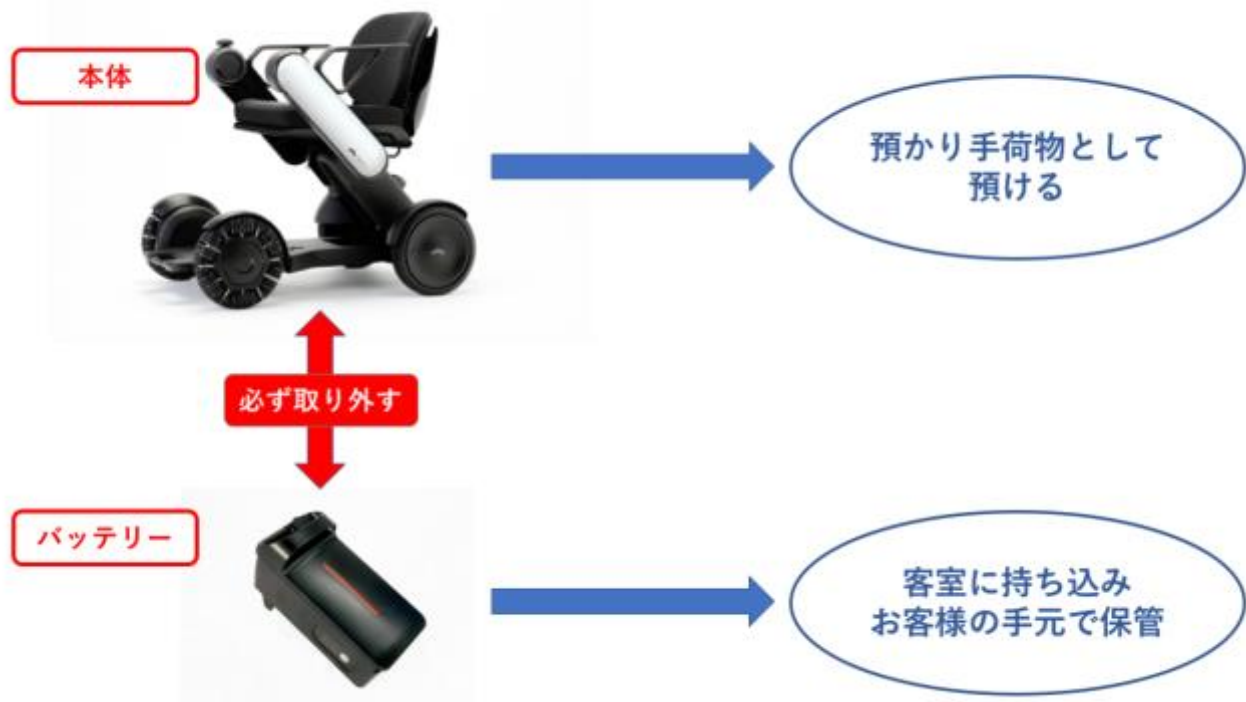

※予備バッテリー1つまで追加して客室持ち込みが可能です。



① 車いすの仕様

モデル名	WHILL Model C および WHILL Model CK			
サイズ	長さ 98.5cm x 幅 55cm x 高さ 74~94cm*			
重量	約 52kg	分解時の重量	シート部	約 14.5kg
			メインボディ部 (後輪)	約 20kg
			ドライブベース部 (前輪)	約 14.5kg
			バッテリー	約 2.8kg
折り畳み/分解	分解可			
ガススプリング	不使用			

*分解時のサイズ (長さ x 幅 x 高さ)

シート部 : 約 57~65cm x 約 55cm x 約 55~67cm

メインボディ部 : 約 50cm x 約 55cm x 約 30cm

ドライブベース部 : 約 75cm x 約 55cm x 約 27cm

② バッテリーの仕様

バッテリータイプ	リチウムイオン電池
容量	10.0Ah
電圧	25.2V
取外し	可
個数	1 個

充電器は、客室持ち込み、もしくは預かり手荷物(スーツケース等)に収納して預けることが可能です。

③ 手動への切り替え方法

1. 本体の電源をオフになっていることを確認します。
2. 座面下の左右2ヶ所にある、赤色の「ブレーキ解除レバー」を下げます。
3. ブレーキをロックするときは、「ブレーキ解除レバー」を上げてください。



バスケットを取り付けている場合、
ブレーキ解除レバーが
見つかりにくいことがあります。




ブレーキ解除レバー

④ 固縛方法

下記にフックをかける場所がありますのでご利用ください。

その他の箇所へフック等をかけると、変形や傷の原因になることがあります。

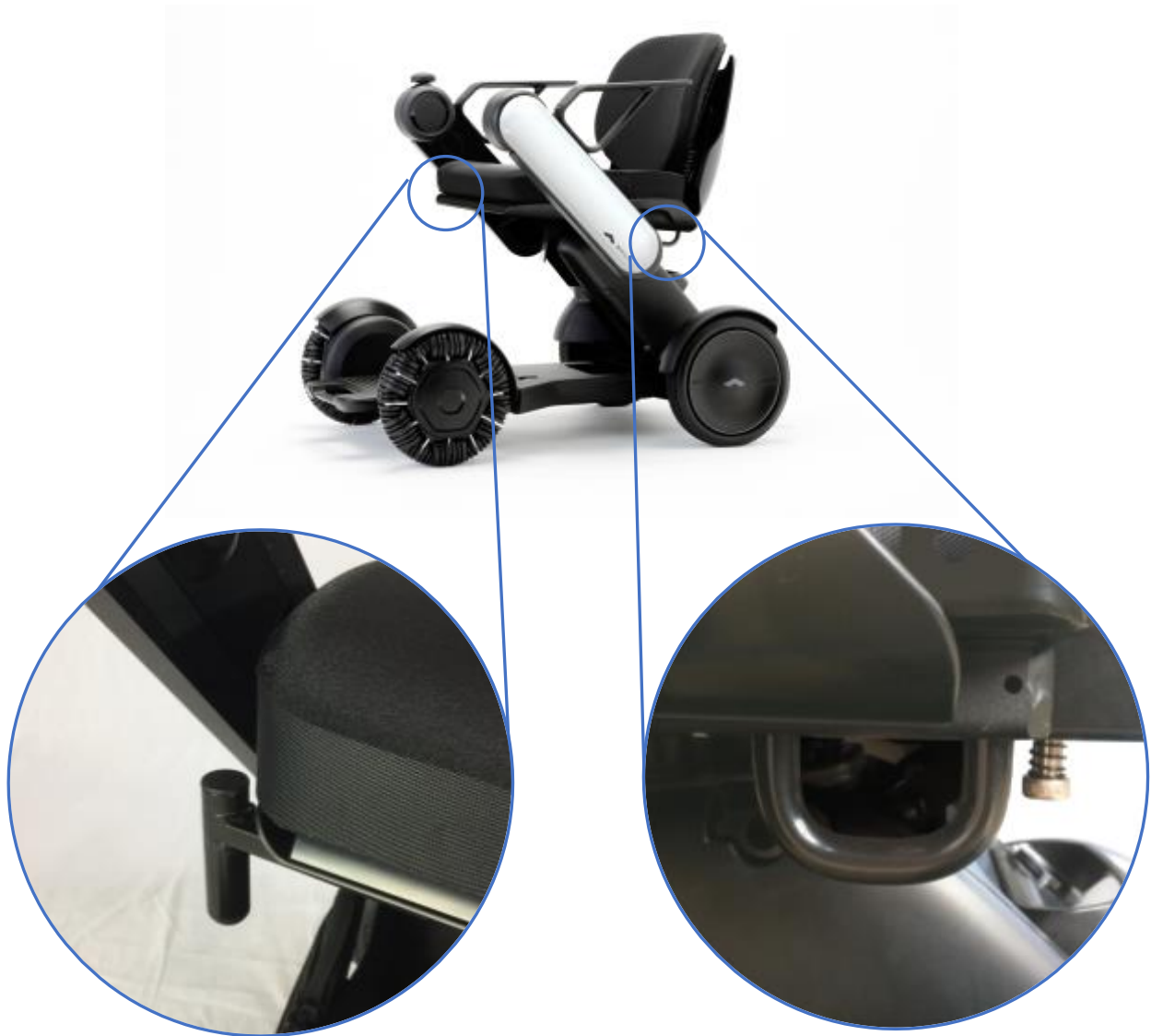

(前方 2 ヶ所) アクセサリーポスト

(後方 2 ヶ所) D リング

WHILL 株式会社

〒230-0045 横浜市鶴見区末広町 1-1-40

横浜市産学共同研究センター実験棟 F 区画

お問い合わせ：0120-062-416 (IP 電話の方：050-3085-9840)