



WHILL Model C をご利用のお客様が航空機に搭乗する際の 本体付属のリチウムイオン電池の取り扱いに関して

取り扱い方法及び注意点

WHILL 社製リチウムイオン電池 CB-01-WW は、航空機輸送可能な電動車椅子用の電池です。
WHILL Model C をご使用になるご本人様をご搭乗される場合には、

- WHILL Model C 本体より電池を取り外してください。
- 短絡が生じないように端子を保護してください。
その際、納品時に付属する保護キャップおよびそれに準じる絶縁物を使用してください
- 取り外した電池は、衝撃および損傷から保護してください
- 規定に従い電池はお客様と共に客室に持ち込み、安全に保管する必要があります。
その際、WHILL Model C 本体は預かり手荷物として輸送して下さい。
- 本体の電池に加えて、予備電池 1 個を輸送可能です。
- その他如何なる内容に関しても航空会社の指示に従ってください。

電池の仕様

WHILL 社製リチウムイオン電池 CB-01-WW は、国連番号 UN3480 に該当するリチウムイオン電池であり、IATA 危険物規則書における危険物に該当します。

この電池は、以下の要件を満たします。

- UN Manual of Test and Criteria, Part III、Section 38.3 の各試験要件に合致しています。
- 300Wh 以下 (253.01Wh) です。

参考情報

本情報は以下の規定に基づいており、規定が改定された場合にはこの限りではありません。

IATA DANGEROUS GOODS REGULATION 規定

2.3 「旅客または乗員が携行する危険物」

2.3.2 「運航者の承認を得て、受託手荷物として受託可能な物品」

2.3.2.4 「リチウム電池を装備した車椅子/移動補助機器」

WHILL Model C の利用者でない方の航空機ご搭乗の際、または電池単体での輸送にあたっては本紙面の取り扱いに該当しません。WHILL 株式会社にお問い合わせください。