

# 7. Foutopsporing

Bij bepaalde problemen met de rolstoel zal er een foutcode worden weergegeven op het LED-scherm. Hieronder volgt een overzicht van de op het LED-scherm weergegeven foutcodes, inhoud, oorzaken en oplossingen.

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
	De stuurschakelaar werd van richting veranderd toen de arm naar boven werd gedraaid.	Breng de arm omlaag en schakel de rolstoel in.
	De stuurschakelaar was niet in de neutrale positie toen de rolstoel werd ingeschakeld.	Schakel de stroom weer in zonder de stuurschakelaar te bedienen.
	De remmen werden ontkoppeld.	Vergrendel de remmen.
	De stekker was aangesloten terwijl de stroom was ingeschakeld, of het apparaat werd ingeschakeld tijdens het laden.	Ontkoppel de stekker van het apparaat.
	Accu leeg.	Laad de accu opnieuw op.
	De snelheidsbeperking is geactiveerd nadat de temperatuur van de accu aanzienlijk is gedaald.	Bewaar de accu op kamertemperatuur of ten minste bij een omgevingstemperatuur van meer dan 0 °C totdat de temperatuur van de accu stijgt tot boven 0 °C.
	De snelheidsbeperking is gedeactiveerd nadat de temperatuur van de accu steeg tot boven 0 °C.	Snelheidsbeperking vanwege lage accutemperatuur is uitgeschakeld.
	De rolstoel bevindt zich op een helling van meer dan 10°. Beoordeel de werkelijke omstandigheden en gebruik deze fout alleen als richtlijn.	Wees voorzichtig en rijd langzaam naar een plek waar de hellingshoek 10° of minder is.

320-07477 02/19 nl



# Model C

## Intelligent Personal EV



Montage

1

Basishandelingen

2

Smartphone-app

3

Vrije modus

4

Bezig met laden

5

Demontage

6

Foutopsporing

7



Dit document is geen vervanging van de gebruikershandleiding. Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding helemaal door.

Montage

Basisinformatie


Smartphone-app

Vrije modus

Bezig met laden

Demontage

Foutopsporing

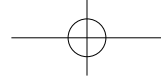

# 1. Montage

Opbergmand (indien aangeschaft)




## 1 Het achterste wielstel ontkoppelen van het voorste wielstel



Pak handgreep A vast en lijn handgreep B uit met de haak op het achterste wielstel.

Kantel het achterste wielstel naar voren en bevestig het aan het voorste wielstel. U hoort een klik wanneer de twee onderdelen correct worden aangesloten.

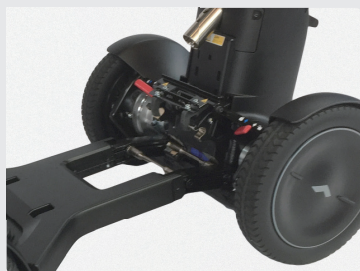

Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging omlaag staat.

## 2 De opbergmand bevestigen (indien aangeschaft)





Lijn de opbergmand uit met het achterste wielstel. Draai de opbergmand en plaats de mand op het voorste wielstel. Druk de klittenband op de onderkant van de opbergmand op het voorste wielstel.

## 3 De zittingeenheid bevestigen



Verwijder het kussen en til de zittingeenheid bij de armleuning op.

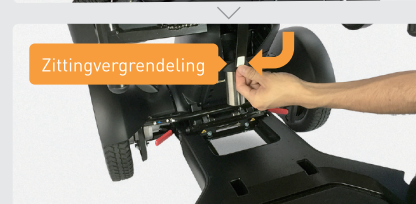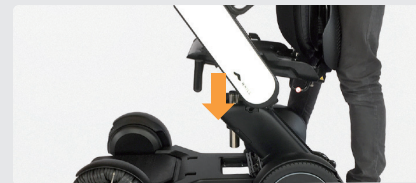

Gebruik het kijkgat en plaats de zittingeenheid op de zittingpen. Trek de zittingvergrendeling omlaag en bevestig het kussen weer aan het frame van de zitting.

## 4 De accu bevestigen



Pak de handgreep van de accu vast en lijn de accu uit met de lipjes aan de onderkant van het accucompartiment. Druk op de bovenkant van de accu om deze te plaatsen. Het achterlicht gaat branden en gaat vervolgens uit. Klaar!



Zorg ervoor dat de accu vóór gebruik volledig is opgeladen.

Montage

Basisinformatie

Smartphone-app

Vrije modus

Bezig met laden

Demontage

Foutopsporing

Montage

Basisinformatie

Smartphone-app

Vrije modus

Bezig met laden


Demontage

Foutopsporing

## 2. Basishandelingen


**!** Zorg ervoor dat u de voeding uitschakelt voordat u plaatsneemt op het apparaat en ervan afstapt.

Besturingspaneel      Stuurleenheid

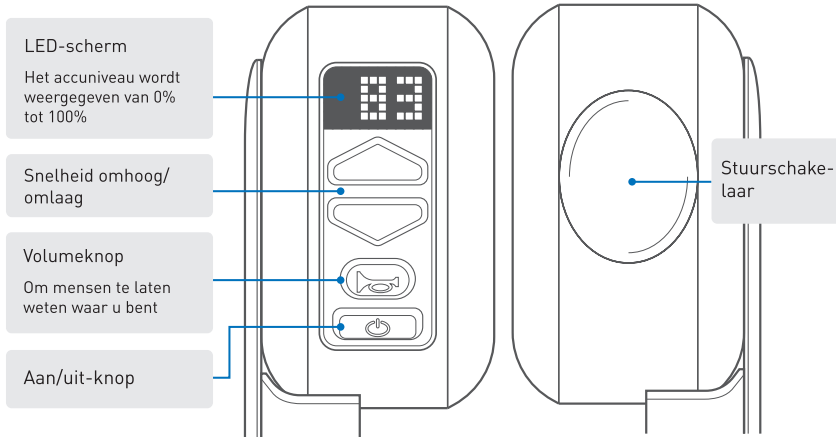

- 1 Gaan zitten** Zorg ervoor dat het LED-scherm is uitgeschakeld voordat u plaatsneemt op de zitting.
- 2 Inschakelen** Controleer of het LED-scherm wordt verlicht wanneer u op de aan/uit-knop drukt.
- 3 Rijden** Kantel de stuurschakelaar langzaam omhoog in de richting waarin u wilt bewegen.
- 4 Stoppen** Als u het apparaat wilt stoppen, haalt u uw hand van de stuurschakelaar.
- 5 Uitschakelen** Controleer of het LED-scherm uitgaat wanneer u op de aan/uit-knop drukt.
- 6 Afstappen** Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld (het LED-scherm is uitgeschakeld) voordat u van het apparaat afstapt.

## 3. Smartphone-app

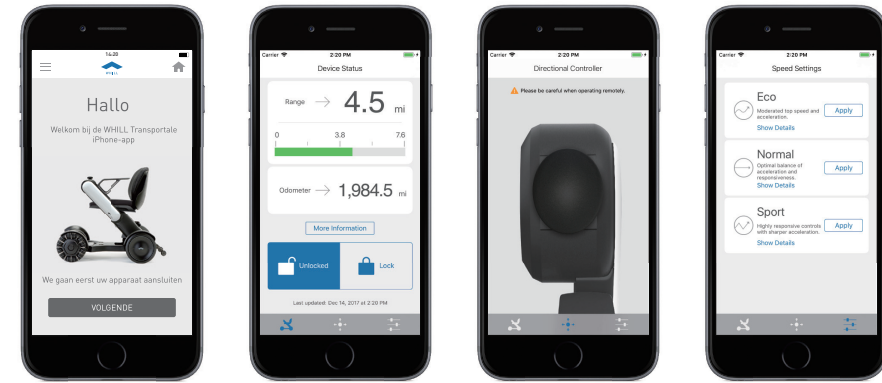

1. Download de WHILL Model C-app in de Apple App Store of Google Play Store
2. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op de smartphone (Zo maakt de smartphone verbinding met het Model C)
3. Open de app en voer de Login-ID en het wachtwoord voor de app in
4. Maak verbinding en configureer de snelheidsinstellingen of de aandrijving op afstand, als u beschikt over een compatibele smartphone

Opmerking: De beschikbaarheid van de WHILL Model C-app kan afwijken afhankelijk van uw regio-instelling.

## 4. Vrije modus

Als u de Model C handmatig wilt bewegen, drukt u aan weerszijden op de rode remvergrendelingen. De vrije modus kan worden gebruikt wanneer de accu van de Model C leeg is of als het apparaat om een andere reden niet bediend kan worden.



**!** Laat de remvergrendeling nooit op een heuvel los.  
Zorg ervoor dat u zich op een vlak oppervlak bevindt voordat u de remvergrendeling loslaat.

## 5. bezig met laden

### 1 Opladen terwijl de accu in de rolstoel is bevestigd

Verplaats het voertuig naar een stopcontact en schakel de stroom uit.

Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.  
Controleer of de indicator van de oplader rood is.

Open de kap en sluit de stekker van het netsnoer op de poort van de oplader aan.  
Het opladen begint wanneer de indicator van de oplader groen knippert.

De accu is volledig opgeladen wanneer het groene lampje stopt met knipperen en blijft branden.

Maak de stekker los en sluit de kap van de poort van de oplader.

### 2 Accu los van het apparaat opladen

Maak de accu los van het apparaat.

Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.  
Controleer of de indicator van de oplader rood is.

Open de kap en sluit de stekker van het netsnoer op de poort van de oplader aan. Het opladen begint wanneer de indicator van de oplader groen knippert. Op dit moment knippert de indicator van het laadniveau aan de zijkant van de oplader ook om de oplaadstatus weer te geven.

De accu is volledig opgeladen wanneer het groene lampje stopt met knipperen en blijft branden. De indicator van het laadniveau gaat uit. Druk op de indicatielampje acculading om het resterende accuniveau te controleren.

Maak de stekker los en sluit de kap van de poort van de laadpoort.  
Plaats de accu terug op het apparaat.



## 6. Demontage voor opslag of vervoer


### 1 De accu uitnemen



Neem de accu uit door de handgreep vast te pakken en deze naar u toe te trekken.

**Controleer of de accu niet vergrendeld is.**

### 2 De zitting uitnemen

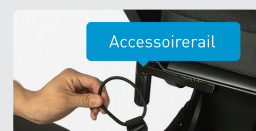

Maak de haakjes van de opbergmand (indien aangeschaft) los van de accessoirerails.



Trek de zittingvergrendeling naar u toe.



Houd de armleningen vast en til de zittingenheid recht omhoog van het achterste wielstel af. Leg de zittingenheid neer.

### 3 De opbergmand uitnemen (indien aangeschaft)

Til de mand op om de klittenband aan de onderkant los te maken waarmee de mand aan het voorste wielstel is bevestigd. Draai de mand naar voren terwijl u deze omhoog houdt en maak de mand los van het achterste wielstel.

### 4 Het voorste wielstel verwijderen



Trek de wielstelvergrendeling naar u toe.



Neem handgreep A vast en ontkoppel het voorste wielstel van het achterste wielstel.

Hier vasthouden:



Voorste wielstel: de handgreep aan het einde van de voetsteun en handgreep A



Achterste wielstel: de handgreep boven het accucompartiment en de kantelbeveiliging

\*Ondersteun het achterste wielstel met uw hand wanneer u het losmaakt om er voor te zorgen dat het niet omvalt.