

Parowanie z aplikacją na smartfona

Aplikacja umożliwia użytkownikom sprawdzanie całkowitego przebiegu, przebytej odległości, poziomu naładowania akumulatora, cykli pełnego naładowania oraz korzystanie z funkcji zdalnego sterowania. Użytkownicy mogą również zablokować i odblokować urządzenie.

1. Aplikację należy zainstalować wcześniej. Aby ją zainstalować, przejdź do App Store i wyszukaj „WHILL”. Kliknij niebieską ikonę z logo WHILL, aby wybrać aplikację WHILL dla modelu seria C2/F. (Szara ikona logo jest przeznaczona dla modelu C urządzenia WHILL).



2. Aby sparować urządzenie, uruchom aplikację WHILL dla modelu C2/F series oraz wprowadź następujące kody* na ekranie lub zeskanuj kod QR.

🔑 11-cyfrowy kod alfanumeryczny

🔑 hasło

*Unikalny identyfikator i hasło parowania aplikacji oraz kod QR są drukowane na kartce papieru i umieszczane w pudełku z podłokietnikami.

Uwaga: W zależności od regionu i typu smartfona aplikacja może być niedostępna lub niektóre funkcje mogą nie działać.

Zgłoszenia naprawy, konserwacji i wymiany części obsługiwane są przez dealera, u którego dokonano zakupu urządzenia.

Dealer

Producent WHILL, Inc.

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002, Japonia

Instrukcja obsługi

WHILL Model F



Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zaleca się przechowywanie tej instrukcji w zawsze dostępnym miejscu.

1. Główne środki ostrożności podczas użytkowania


WHILL Model F to pojazd wspomagający poruszanie. Osoby, które mają trudności z obsługą elektrycznego wózka inwalidzkiego, nie powinny używać tego urządzenia.

- Maksymalne obciążenie tego urządzenia wynosi 253,5 lb (ok. 115 kg). Dotyczy to łącznej wagi użytkownika i bagażu. Podczas użytkowania upewnij się, że ciężar ładunku nie przekracza wartości maksymalnej.
- Wyłącz zasilanie urządzenia podczas wsiadania i zsiadania.
- Podczas jazdy trzymaj stopy na podnóżku, aby uniknąć zahaczenia stopami lub ubraniem o ruchome elementy.
- Unikaj ruchu ulicznego i wąskich przestrzeni oraz przestrzegaj zasad ruchu drogowego, aby jeździć bezpiecznie.

Ubierz się odpowiednio do warunków jazdy.


- Elementy odzieży takie jak długie szale, luźne spodnie, spódnice i płaszcze przeciwdeszczowe mogą zostać wciągnięte przez opony lub inne części urządzenia, powodując obrażenia.
- Jeśli nosisz rękawice, uważaj, aby nie zaczepiły się one o urządzenie, np. o elementy sterujące.

W następujących miejscach zachowaj ostrożność.

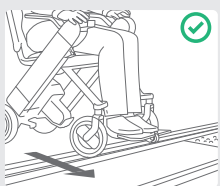

W przypadku przejeżdżania przez tory kolejowe lub tramwajowe, zbliżaj się do nich i przekraczaj je prostopadłe.

Uważaj, aby urządzenie nie utknęło w rowku szyn.

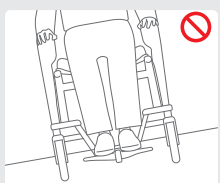

Nie należy jeździć w miejscach, gdzie urządzenie może się znacznie przechylic.


Unikaj przejazdów kolejowych i wybieraj bezpieczniejszą trasę, kiedy tylko jest to możliwe. Jeśli musisz przejechać przez przejazd kolejowy, upewnij się, że wiesz, jak ręcznie zwolnić hamulce (str. 4) i poproś opiekuna o pomoc.

Nie należy jeździć po terenach o miękkiej nawierzchni, takich jak piasek, błoto, śnieg lub zamrożone ścieżki. Stwarza to ryzyko wypadku.

● Niebezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego (MR)
Pojazd WHILL Model F nie jest bezpieczny w środowisku MR. Urządzenie stwarza zagrożenie zranienia odtłakami.



2. Podstawowe czynności

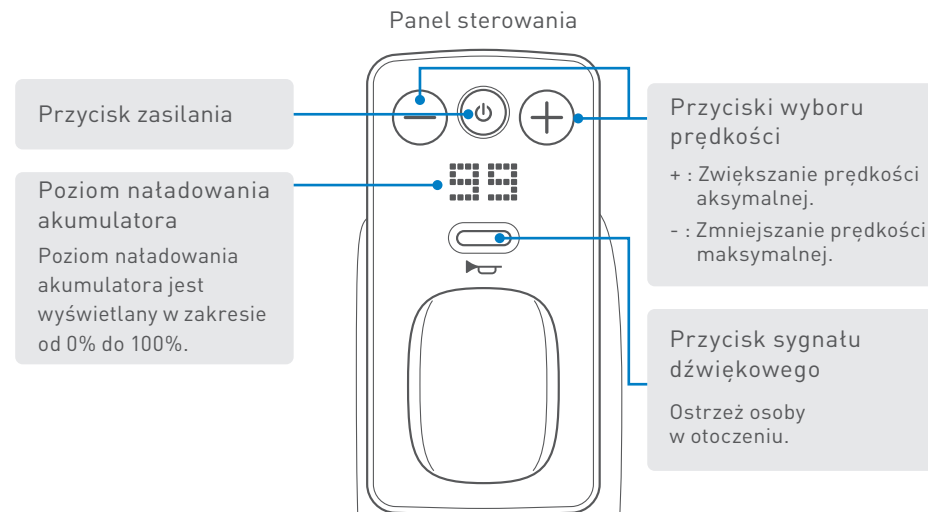

- 1 Wsiadanie** Zanim usiądziesz, upewnij się, że zasilanie urządzenia jest wyłączone.
- 2 Włączanie zasilania** Naciśnij przycisk zasilania i upewnij się, że wyświetlacz jest włączony.
- 3 Ustawianie prędkości** Ustaw prędkość od 1 do 4 za pomocą przycisków wyboru prędkości.
- 4 Jazda i skręcanie** Powoli przesunij joystick w żądanym kierunku.
- 5 Zatrzymanie** Zwolnij joystick.
- 6 Wyłączenie zasilania** Naciśnij przycisk zasilania i upewnij się, że wyświetlacz jest wyłączony.
- 7 Zsiadanie** Zanim zsiądziesz, upewnij się, że wyświetlacz jest wyłączony.



Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie urządzenia podczas wsiadania i zsiadania.

2. Wskazówki dotyczące jazdy Podstawowe czynności

1. Zatrzymywanie

Aby się zatrzymać, zwolnij joystick. Zwolnienie joysticka powoduje automatyczne uruchomienie hamulców i zatrzymanie urządzenia nawet na zbiegu lub wzniesieniu.

2. Trzymanie joysticka

Umieść palce na joysticku.



3. Operowanie joystickiem

Regulacja prędkości
Prędkość można regulować, zmieniając wychylenie joysticka. Na początku wykonaj delikatny ruch joystickiem i jedź powoli.




Niewielkie przechylenie = powoli



Większe przechylenie = szybko

Wjeżdżanie na stopień
Podjedź pod kątem prostym do stopnia, na który chcesz wjechać.

Zatrzymaj się tuż przed schodkiem i zwolnij, gdy przednie koła wjadą na niego.

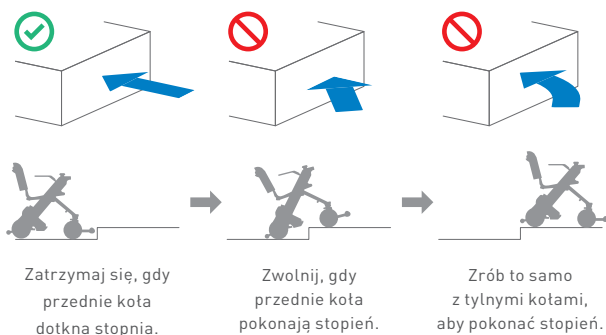

3. Zwalnianie hamulców

Niektóre sytuacje mogą wymagać sterowania urządzeniem bez włączenia zasilania i używania joysticka – jest to tzw. tryb wolnego koła. Jest to możliwe przy użyciu dwóch czerwonych dźwigni zwalniania hamulców.

Wyłącz zasilanie urządzenia. Naciśnij w dół obie dźwignie zwalniania hamulca poniżej siedziska.

Podnieś obie dźwignie zwalnijące hamulce, aby ponownie włączyć hamulce.



Dźwignie do uruchamiania lub zwalniania hamulców

! Nie zwalnij hamulców na pochyłości. Hamulce można zwolnić tylko na płaskiej powierzchni oraz w sytuacjach awaryjnych, po wyłączeniu zasilania. Po ręcznym przemieszczeniu urządzenia ze zwolnionymi hamulcami podnieś obie dźwignie zwalnijące hamulce, aby ponownie włączyć hamulce.

4. Procedura składania

Model F ma funkcje składania.

! Składanie urządzenia należy wykonywać na płaskiej i równej powierzchni. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wypadku.

! Składanie urządzenia należy wykonywać z zaciągniętymi hamulcami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niezamierzonego ruchu urządzenia, co może spowodować wypadek.

Trzymając urządzenie, chwyć tylko uchwyt i element zgodnie z opisem na zdjęciu. W przeciwnym przypadku może dojść do obrażeń dłoni, jeśli utknie ona w urządzeniu.



1 Pochyl oparcie do przodu, do siedziska.



2 Zamocuj urządzenie na miejscu, podtrzymując pedał.



Wspomagający pedał łączy dwie rolki przeciwwyrotne zapobiega przesuwaniu się urządzenia po złożeniu.



Istnieje ryzyko obrażeń stopy, jeśli utknie pod pedałem podczas składania urządzenia.

3 Naciśnij przycisk zwalniania blokady



Przycisk zwalnający blokadę znajduje się z przodu prawego ramienia. Utrzymuj urządzenie w tym stanie z wciśniętym przyciskiem zwalniania zatrzasku.

4 Pociągnij rurę ramy siedziska do góry.



Chwyć rurę ramy siedziska z tyłu siedziska i pociągnij ją do góry, naciskając jednocześnie przycisk zwalnający blokadę.



Gdy urządzenie zacznie się zamykać, zdejmij rękę z przycisku zwalnającego blokadę.

5 Zamknij urządzenie.



Zamknij urządzenie w pozycji, w której usłyszysz dźwięk kliknięcia. Na koniec ponownie delikatnie naciśnij rurę ramy siedziska, aby upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zablokowane i nie otworzy się.



Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zablokowane po złożeniu, aby zapobiec ryzyku jego nieoczekiwanego otwarcia.

5. Rozkładanie urządzenia



- Rozkładanie urządzenia należy wykonywać na płaskiej i równej powierzchni.
- Rozkładanie urządzenia należy wykonywać z zaciągniętymi hamulcami.
- Podczas rozkładania urządzenia chwyć tylko uchwyt i element zgodnie z opisem na zdjęciu.

1 Zamocuj urządzenie na miejscu, podtrzymując pedał.



Wspomagający pedał łączący dwie rolki przeciwwyrotne zapobiega przesuwaniu się urządzenia podczas rozkładania.

2 Pociągnij rurę ramy siedziska do góry i naciśnij przycisk zwolnienia blokady.




Chwyć rurę ramy siedziska z tyłu siedziska i pociągnij ją, aby utrzymać urządzenie w odpowiedniej pozycji.



Naciśnij przycisk zwalniający blokadę z przodu prawego ramienia.

Przycisk zwalniający blokadę zaprojektowano tak, aby można go było wcisnąć tylko wtedy, gdy rura ramy siedziska jest ciągnięta do góry.

3 Opuść rurę ramy siedziska.

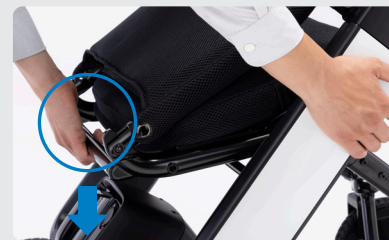

Opuść rurę ramy siedziska, jednocześnie naciskając przycisk zwalniający blokadę, aby rozłożyć urządzenie. Gdy urządzenie zacznie się rozkładać, zdejmij rękę z przycisku.

4 Roztóż urządzenie.



Otwórz urządzenie do pozycji, w której usłyszysz dźwięk kliknięcia.

5 Przechyl oparcie do tyłu i sprawdź wskaźnik blokady.



Upewnij się, że wskaźnik blokady po wewnętrznej stronie prawego ramienia jest czarny.



Upewnij się, że wskaźnik blokady jest czarny po rozłożeniu urządzenia, aby zapobiec niezamierzonemu rozłożeniu urządzenia podczas jazdy, co może spowodować wypadek.

6. Ładowanie akumulatora

1 Ładowanie, gdy akumulator jest zamontowany w urządzeniu

Przenieś urządzenie w pobliże gniazdka i wyciągnij zasilanie urządzenia.
Podłącz ładowarkę i przewód zasilający AC.

Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Wskaźnik ładowarki zaświeci się na czerwono.

Zdejmij zaślepkę portu ładowania akumulatora i podłącz do niego złącze zasilania DC. Wskaźnik ładowarki zacznie migać na zielono.
Rozpocznie się ładowanie akumulatora.

Ładowanie zostanie zakończone, gdy wskaźnik ładowarki zaświeci się na zielono.

Odtłącz złącze zasilania DC od akumulatora, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania. Załóż zaślepkę na port ładowania akumulatora.



2 Ładowanie, gdy akumulator jest zdemontowany z urządzenia

Sprawdź, czy zasilanie urządzenia jest wyłączone i naciśnij przycisk zwalniający blokadę akumulatora. Chwyć za uchwyt i pociągnij, aby wyjąć akumulator.

Podłącz ładowarkę i przewód zasilający AC. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

Zdejmij zaślepkę portu ładowania akumulatora i podłącz do niego złącze zasilania DC. Wskaźnik ładowarki zacznie migać na zielono. Rozpocznie się ładowanie akumulatora.

Ładowanie zostanie zakończone, gdy wskaźnik ładowarki i dioda LED akumulatora zaświecą się na zielono.

Odtłącz złącze zasilania DC od akumulatora, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.



- Nie dotykaj akumulatora i ładowarki podczas ładowania, aby zapobiec poparzeniom.
- Zapewnij, by ładowanie akumulatora odbywało się w pomieszczeniach zamkniętych.
- Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek przeznaczonych do tego urządzenia.

7. Troubleshooting

Jeśli w urządzeniu wystąpi określony problem, na ekranie wyświetlony zostanie kod błędu. Jeśli wyświetlony zostanie błąd, którego nie ma na liście, lub problem nie ustąpi nawet po zastosowaniu procedury wymienionej w tabeli, należy skontaktować się z dealerem lub działem obsługi klienta.

| Zachowanie urządzenia | Kod błędu | Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|-----------|---|--|
| Pojawia się ikona pokazana po prawej stronie. | 01 | Kontroler obsługiwany jest ze złożonym urządzeniem. | Odblokuj urządzenie i ponownie włącz zasilanie. |
| | 02 | Joystick nie znajdował się w pozycji neutralnej, gdy włączone zostało zasilanie. | Ponownie włączyć zasilanie, nie dotykając joysticka. |
| | 03 | Dźwignie hamulca są zwolnione. | Aktywować hamulce i ponownie włączyć zasilanie. |
| | 04 | Ładowarka została podłączona, gdy zasilanie było włączone, lub urządzenie zostało włączone, gdy było podłączone do ładowarki. | Odtłączyć ładowarkę od akumulatora. |
| | 05 | Niski poziom naładowania akumulatora. | Naładować akumulator. |
| Prędkość maksymalna spadła. | 06 | Temperatura akumulatora znacząco spadła. | Umieścić akumulator w temperaturze otoczenia lub przynajmniej w temperaturze otoczenia powyżej 0°C (32°F) do czasu, aż jego temperatura wzrośnie powyżej 0°C (32°F). |
| Maksymalna prędkość zostanie przywrócona. | 07 | Temperatura akumulatora wzrosła powyżej 0°C (32°F). | |
| Pojawia się ikona pokazana po prawej stronie. | 08 | Niski poziom energii baterii kluczyka inteligentnego. | Wymienić baterię kluczyka inteligentnego. |
| Urządzenie nie włącza się. Wyświetlacz LED nie świeci. | ND | Niski poziom naładowania akumulatora. | Naładować akumulator. |
| | | Akumulator nie jest prawidłowo wsunięty do komory w tylnej podstawie jezdnej. | Dokładnie wsunąć akumulator. Wyjąć akumulator, a następnie włożyć go ponownie po 10 sekundach. |
| | | Złącze kablowe z tyłu siedziska jest odtłączone. | Podłączyć złącze kabla. |