

Comment coupler votre application pour smartphone

L'application permet aux utilisateurs de vérifier le kilométrage total, la distance parcourue, le niveau de la batterie, les cycles de charge complète et d'utiliser la fonction de télécommande. Les utilisateurs peuvent également verrouiller et déverrouiller l'appareil.

1. Vous devez installer l'application au préalable. Pour l'installer, rendez-vous sur l'App Store et recherchez « WHILL ». Cliquez sur l'icône bleue du logo WHILL pour l'application WHILL Model C2.
(L'icône du logo gris correspond à WHILL Model C)



2. Pour coupler votre appareil, lancez l'application WHILL Model C2 et saisissez les codes suivants* à l'écran.

🔑 Code alphanumérique à 11 caractères

🔑 Mot de passe

*Les deux codes sont imprimés sur le reçu papier placé ///dans le bordereau du siège de l'appareil.

Remarque : Selon la région et le type de smartphone, il se peut que l'application ou certaines fonctions ne soient pas disponibles.

Le distributeur auprès duquel l'appareil a été acheté traitera les demandes de réparation, de maintenance et de remplacement des pièces.

Distributeur

Fabricant WHILL, Inc.

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japon

www.whill.inc

Guide de fonctionnement

WHILL Model C2



Le présent Guide de fonctionnement est destiné à fournir des instructions sur l'utilisation de base de l'appareil. Pour une utilisation sûre de l'appareil, veuillez à lire attentivement ce guide avant l'emploi. Il est recommandé de garder ce guide à portée de main à tout moment à titre de référence.

1. Principales précautions d'utilisation


Le WHILL Model C2/CK2 est un véhicule de mobilité. Les personnes qui éprouvent des difficultés à utiliser un fauteuil roulant électrique doivent s'abstenir d'utiliser l'appareil.

- Le poids maximum que peut supporter cet appareil est d'environ 136 kg (300 lb). Ce poids inclut l'occupant et les bagages éventuels. Veillez à ne pas dépasser le poids maximum que peut supporter cet appareil pendant l'utilisation.
- Coupez l'alimentation de l'appareil pour y monter ou en descendre.
- Gardez les pieds sur le repose-pieds pendant la conduite pour éviter que vos pieds ou vos vêtements ne se coincent dans des composants mobiles.
- Évitez la circulation et les espaces étroits, et respectez le code de la route pour conduire en toute sécurité.

Habillez-vous de manière appropriée pour conduire.


- Il existe un risque que les vêtements tels que les longues écharpes, les pantalons amples, les jupes et les manteaux de pluie se prennent dans les pneus ou d'autres pièces de l'appareil, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Si vous portez des gants, veillez à ce qu'ils ne se coincent pas dans l'appareil, par exemple dans les composants de commande.

Conduisez prudemment dans les zones suivantes.

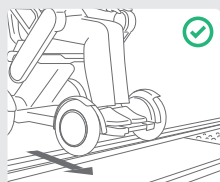

Lorsque vous traversez des passages à niveau ou des voies de tram, approchez-vous et traversez perpendiculairement aux voies.


Veillez à ce que l'appareil ne se coince pas dans la rainure des rails.

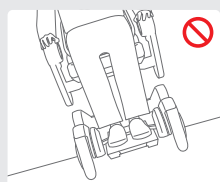

Ne conduisez pas à des endroits où l'appareil risque de s'incliner de manière significative.

Évitez les passages à niveau et empruntez un itinéraire plus sûr autant que possible. Si vous devez franchir un passage à niveau, assurez-vous de comprendre comment desserrer manuellement les freins (p4) et demandez à un soignant de vous accompagner. Ne conduisez pas l'appareil dans des zones à surface molle comme le sable, la boue, les chemins enneigés ou gelés. Il y a un risque que des accidents se produisent.

2. Opérations de base

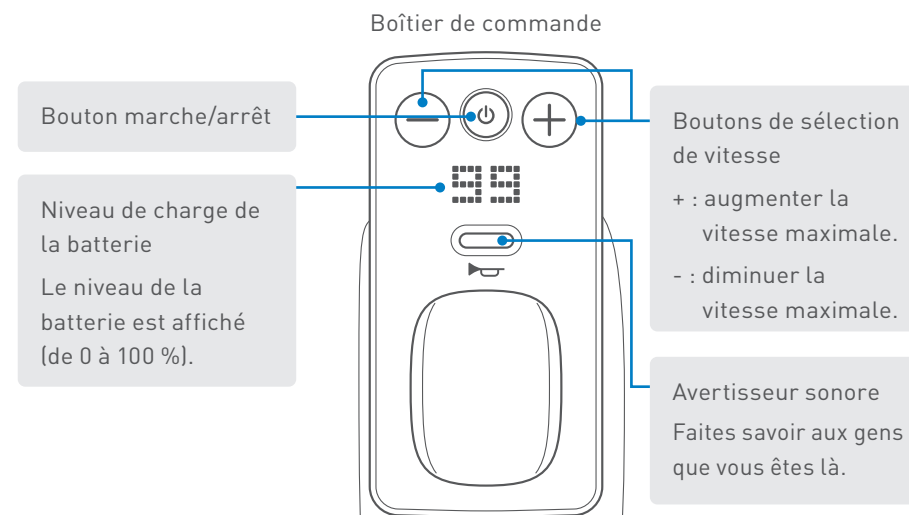

- 1 Monter dans l'appareil** Vérifiez que l'appareil est éteint avant de monter dedans.
- 2 Allumer l'appareil** Appuyez sur le bouton marche/arrêt et vérifiez que l'écran s'allume.
- 3 Régler la vitesse** Réglez la vitesse de 1 à 4 à l'aide des boutons de sélection de vitesse.
- 4 Se déplacer et tourner** Déplacez lentement le joystick dans la direction souhaitée.
- 5 Arrêter** Relâchez le joystick.
- 6 Éteindre l'appareil** Appuyez sur le bouton marche/arrêt et vérifiez que l'écran s'éteint.
- 7 Descendre de l'appareil** Vérifiez que l'écran est éteint, puis descendez de l'appareil.

⚠ Veillez à couper l'alimentation de l'appareil pour y monter ou en descendre.

2. Conseils pour la conduite Opérations de base

1. Comment s'arrêter

Relâchez le joystick pour arrêter l'appareil. Lorsque vous relâchez le joystick, les freins s'enclenchent automatiquement et l'appareil s'arrête, même en montée ou en descente.

2. Comment tenir le joystick

Placez les doigts sur le joystick.



3. Comment déplacer le joystick


Réglage de la vitesse
La vitesse de l'appareil peut être contrôlée en fonction du degré d'inclinaison du joystick. Au début, assurez-vous d'actionner le joystick doucement et de conduire lentement.



Inclinaison légère = lent

Plus d'inclinaison = rapide

Franchir une marche
Lorsque vous franchissez une marche, approchez-la en formant un angle droit avec celle-ci.

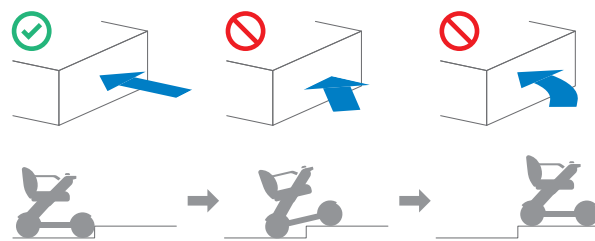

Arrêtez-vous lorsque les roues avant butent contre la marche.

Ralentissez une fois que les roues avant ont franchi la marche.

Faites de même pour les roues arrière afin que l'appareil passe au-dessus de la marche.

3. Débrayage des freins

Dans certaines situations, il peut être nécessaire de contrôler l'appareil sans l'allumer et sans utiliser le joystick (mode roue libre). Pour cela, utilisez les deux leviers de débrayage rouges.

Coupez l'alimentation de l'appareil. Abaissez les deux leviers de débrayage situés sous le siège.



Pour réenclencher les freins, relevez les deux leviers de débrayage.



Ne pas relâcher les freins sur une pente. Veillez à relâcher les freins uniquement lorsque vous êtes sur une surface plane et en cas d'urgence après avoir coupé le courant. Après avoir déplacé l'appareil manuellement avec les freins relâchés, veillez à soulever les deux leviers de débrayage afin de réenclencher les freins.

4. Utilisation de la clé électronique

La clé électronique peut être utilisée pour verrouiller et déverrouiller l'appareil.



Appuyez sur le bouton de verrouillage de la clé électronique. L'icône indiquant le statut verrouillé apparaît sur l'écran de l'unité de commande et émet un son de verrouillage. Si vous tentez d'allumer l'appareil alors qu'il est verrouillé, l'icône indiquant le statut verrouillé apparaît sur l'écran. Il est impossible d'allumer l'appareil.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la clé électronique. La LED de la clé électronique s'allume et l'icône indiquant le statut déverrouillé apparaît sur l'écran et émet un son de déverrouillage. L'appareil WHILL est alors déverrouillé.

Vendu séparément. Doté d'articles standard selon la région/le pays.

5. Procédure de démontage



Lors du montage ou du démontage de l'appareil, ne saisissez que les poignées et les pièces, comme décrit dans les instructions, et ne tenez pas l'appareil par d'autres endroits.

Cet appareil compte cinq composants :


※ Retirez la batterie avant de procéder au démontage.



1 Retrait de la batterie



Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie. Saisissez la poignée et tirez-la pour retirer la batterie.

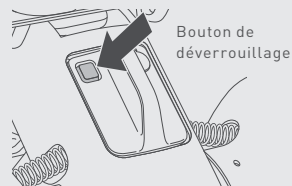

2 Retrait du siège



Tirez vers vous le levier de verrouillage du siège.

※ Soulevez doucement le siège afin qu'il n'endommage pas les autres pièces.
※ Lorsque vous placez le siège sur le sol, placez-le avec le coussin vers le haut.



Lorsque vous soulevez le siège, le magnétisme des connecteurs situés au niveau de la connexion entre le siège et la base de propulsion arrière risque de perturber le fonctionnement des dispositifs médicaux électriques. Les personnes portant un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou d'autres dispositifs médicaux électriques dans le corps doivent garder une distance d'au moins 20 cm (8 pouces) entre elles et les connecteurs magnétiques.

3 Retrait du panier

Retirez les articles du panier, puis soulevez-le tout droit en le tenant par ses poignées et détachez-le de la base de traction avant.

4 Déconnexion de la base de traction avant



Levez la poignée de déverrouillage de la base.




Saisissez la poignée située près du centre de la base de traction avant et déconnectez la barre B à une extrémité de la base de traction avant du crochet de la base de propulsion arrière.



* Lors du démontage, soutenez la base de propulsion arrière avec votre main pour l'empêcher de tomber.

6. Procédure de montage

1 Montage de la base de traction avant et de la base de propulsion arrière

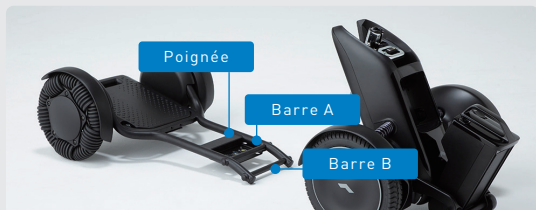

Saisissez la poignée située près du centre de la base de traction avant tout en inclinant la base de propulsion arrière. Alignez ensuite la barre B avec le crochet de la base de propulsion arrière.




Inclinez doucement la base de propulsion arrière vers l'avant et connectez-la à la base de traction avant. La poignée de déverrouillage de la base de propulsion arrière s'enclenche sur la barre A de la base de traction avant. Un déclic retentit lorsque les deux pièces sont correctement connectées.

2 Installation du panier



Alignez les crochets du fond du panier avec le cadre de la base de traction avant, puis poussez le panier tout droit vers le bas. Poussez sur la partie plate au fond du panier jusqu'à entendre un déclic.

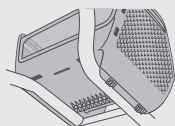


! Si l'appareil ne démarre pas correctement alors qu'une batterie insérée est rechargée et que l'appareil est allumé, retirez la batterie, puis réinsérez-la après 10 secondes.

3 Installation du siège



Retirez le coussin du siège, saisissez les accoudoirs et soulevez le siège.

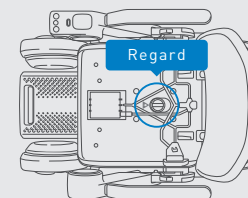

Utilisez le regard pour aligner et positionner le siège sur la tige de selle.



Poussez le levier de verrouillage du siège en position verticale et //fixez le coussin de dossier à une base de siège.

4 Installation de la batterie



Assurez-vous que le bouton de déverrouillage de la batterie n'est pas enfoncé. Saisissez la poignée de la batterie et insérez la batterie dans son compartiment. En cas de difficulté, poussez la batterie avec plus de force.

7. Recharge de la batterie

1 Recharge avec la batterie installée sur l'appareil

Placez l'appareil près de la prise et coupez son alimentation.
Branchez le chargeur et le cordon d'alimentation secteur.

Branchez le chargeur sur la prise de courant. L'indicateur de charge s'allume en rouge.

Retirez le capuchon du port de charge de la batterie et branchez le connecteur CC sur le port de charge de la batterie. L'indicateur de charge se met à clignoter en vert, et la recharge commence.

La recharge est terminée lorsque l'indicateur de charge devient vert fixe.

Débranchez le connecteur CC de la batterie, puis débranchez la fiche de la prise de courant. Fermez le capuchon du port de charge de la batterie.

2 Recharge avec la batterie retirée de l'appareil

Vérifiez que l'appareil est éteint et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie.
Saisissez la poignée et tirez-la pour retirer la batterie.

Branchez le chargeur et le cordon d'alimentation secteur. Branchez le chargeur sur la prise de courant.

Retirez le capuchon du port de charge de la batterie et branchez le connecteur CC sur celui-ci.
L'indicateur de charge se met à clignoter en vert, et la recharge commence.

La recharge est terminée lorsque l'indicateur de charge et la LED de batterie deviennent vert fixe.

Débranchez le connecteur CC de la batterie, puis la fiche de la prise de courant.



- Ne touchez pas la batterie et le chargeur pendant la charge pour éviter les brûlures.
- Assurez-vous de recharger la batterie à l'intérieur.
- La batterie et le chargeur sont uniquement destinés au WHILL Model C2.
- N'utilisez que la batterie et le chargeur prévus pour l'appareil.

8. Dépannage

En cas de problème avec l'appareil, un code d'erreur apparaît à l'écran.

Si une erreur non répertoriée s'affiche ou si le problème persiste alors que la procédure de dépannage a bien été appliquée, contactez votre distributeur ou le service clientèle.

| Comportement de l'appareil | Code d'erreur | Cause | Résolution |
|----------------------------------|---------------|---|---|
| L'icône de droite apparaît. | | Tentative d'utiliser le boîtier de commande alors que le bras est tourné vers le haut. | Baissez le bras et remettez l'appareil en marche. |
| | | Le joystick n'était pas en position neutre lorsque l'alimentation a été allumée. | Rallumez l'alimentation sans toucher le joystick. |
| | | Les leviers de frein sont désenclenchés. | Verrouillez les freins et remettez l'appareil sous tension. |
| | | Le chargeur était branché alors que l'appareil était sous tension, ou l'appareil a été allumé alors qu'il était connecté au chargeur. | Débranchez le chargeur de la batterie. |
| | | Le niveau de charge de la batterie est faible. | Rechargez la batterie. |
| La vitesse maximale diminue. | | La température de la batterie a chuté considérablement. | Stockez la batterie à température ambiante ou à une température ambiante au moins supérieure à 0 °C (32 °F) jusqu'à ce que la température de la batterie remonte au-dessus de 0 °C (32 °F). |
| La vitesse maximale se rétablit. | | La température de la batterie a dépassé 0 °C (32 °F). | |
| L'icône de droite apparaît. | | La pile de la clé électronique est plate. | Remplacez la pile de la clé électronique. |
| L'icône de droite apparaît. | | Il se peut que l'appareil se trouve sur une pente raide. | Il se peut que l'appareil se trouve sur une pente où il est dangereux de conduire. Déplacez-vous lentement vers un endroit où la pente est douce tout en veillant à votre sécurité. Une fois que l'avertissement sonore a retenti, il ne retentit plus pendant environ 2 minutes. |



- Si l'appareil ne s'allume pas, vérifiez le niveau de la batterie et si elle est insérée à fond dans le compartiment. Si l'appareil ne démarre pas correctement, retirez la batterie, puis réinsérez-la après 10 secondes et allumez l'appareil après 5 secondes.