

## Pairing dell'app dello smartphone

L'app consente di controllare il chilometraggio totale, la distanza percorsa, il livello della batteria, i cicli di carica completi, nonché utilizzare la funzione del telecomando. Gli utenti possono inoltre bloccare e sbloccare il dispositivo.

1. Installare prima l'app. Per farlo, andare su App Store e cercare "WHILL". Fare clic sull'icona del logo blu WHILL per l'app del Modello C2/serie F. (L'icona del logo grigio è per il Modello C.)



2. Per il pairing del dispositivo, lanciare l'app WHILL Modello C2/serie F e inserire i codici\* seguenti sulla schermata o inquadrare il codice QR.\*

- 🔑 Codice alfanumerico a 11 cifre
- 🔑 password

\*L'ID e la password unici dell'app di accoppiamento e il codice QR sono stampati su un foglietto e inseriti nella scatola che contiene i braccioli.  
Nota: a seconda della località e del tipo di smartphone, l'app o alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Il rivenditore presso il quale è stato acquistato il dispositivo si incaricherà di gestire le richieste di riparazione, manutenzione e sostituzione pezzi.

Rivenditore

Fabbricante WHILL, Inc.

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Giappone

## Guida al funzionamento

# WHILL Modello F



Lo scopo di questa Guida di funzionamento è fornire istruzioni per l'utilizzo base del dispositivo. Per azionare il dispositivo in sicurezza, leggere attentamente la guida prima dell'uso. Si raccomanda di tenere sempre la guida a portata di mano a scopo di riferimento futuro.

# 1. Principali precauzioni per l'uso

Il modello WHILL F è un veicolo per la mobilità. Le persone che hanno difficoltà ad utilizzare una carrozzina elettrica dovrebbero astenersi dall'utilizzare il dispositivo.

- Il peso massimo del carico di questo dispositivo è di 115 kg (253.5lb), incluso l'occupante ed eventuali oggetti trasportati. Accertare che il peso del carico non superi il valore massimo durante l'utilizzo.
- Prima di salire e scendere dal dispositivo, assicurarsi che sia spento.
- Durante la guida, tenere i piedi sulla pedana per evitare che piedi o indumenti restino incastrati nelle parti mobili.


## Vestirsi in modo adatto alla guida.

- Esiste il rischio che indumenti come sciarpe lunghe, pantaloni larghi, gonne e impermeabili restino incastrati negli pneumatici o in altre parti del dispositivo, causando lesioni.
- Verificare che i guanti eventualmente indossati alla guida non rimangano impigliati nel dispositivo, per esempio nei componenti di controllo.

## Guidare con cautela nelle aree riportate di seguito.



Per attraversare i binari della ferrovia o del tram, è necessario avvicinarsi e avanzare perpendicolarmente ai binari.  
Verificare che il dispositivo non resti bloccato nelle scanalature dei binari.

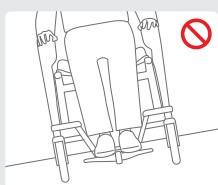

Non guidare nei luoghi in cui il dispositivo possa risultare fortemente inclinato.

Non attraversare i binari e scegliere percorsi più sicuri, se possibile.  
Qualora sia inevitabile attraversare i binari, verificare il rilascio manuale dei freni (p4) e chiedere di essere accompagnati.




Non azionare il dispositivo su superfici morbide come sabbia, fango, neve o ghiaccio, onde evitare il rischio di incidenti.

● Non compatibile con l'ambiente di risonanza magnetica (RM)

Il modello WHILL F non è compatibile con la risonanza magnetica (etichettatura MR Unsafe) Il dispositivo presenta il rischio di un effetto proiettile.



# 2. Operazioni base

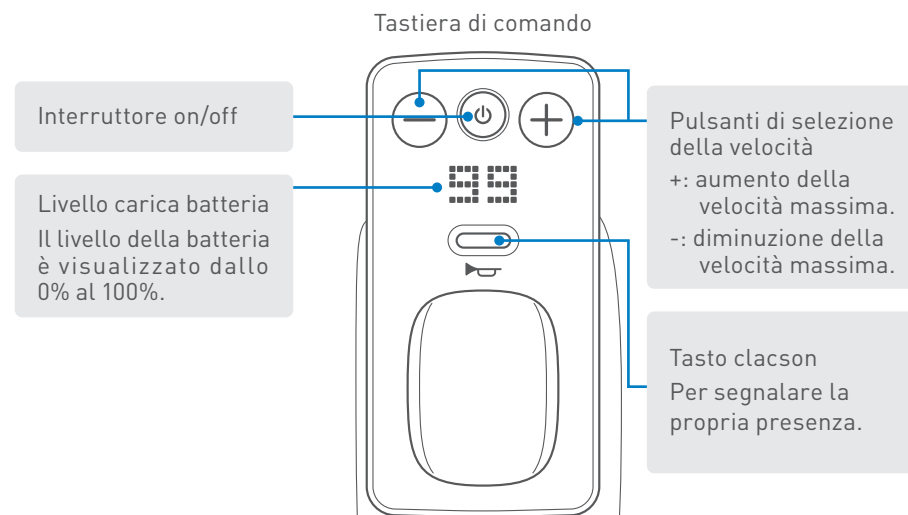

- 1 Accesso al dispositivo** Prima di accedere al dispositivo, assicurarsi che sia spento.
- 2 Accendere l'alimentazione** Premere l'interruttore on/off e confermare l'accensione del display.
- 3 Impostare la velocità** Regolare l'impostazione della velocità da 1 a 4 con gli appositi pulsanti di selezione.
- 4 Spostamento e svolta** Muovere il joystick lentamente nella direzione desiderata.
- 5 Arresto** Rilasciare il joystick.
- 6 Spegner l'alimentazione** Premere l'interruttore on/off e confermare lo spegnimento del display.
- 7 Uscire dal dispositivo** Confermare che il display sia spento e uscire dal dispositivo.



Prima di salire e scendere dal dispositivo, assicurarsi che sia spento,

## 2. Consigli di guida Operazioni base

### 1 Arresto

Per fermarsi, rilasciare il joystick. In questo modo, vengono azionati automaticamente i freni e il dispositivo si arresta, anche in salita o in discesa.

### 2 Come tenere il joystick

Posizionare le dita sul joystick.



### 3 Come spostare il joystick

**Regolazione della velocità**  
La velocità del dispositivo può essere regolata in base al grado di inclinazione del joystick. All'inizio, azionare il joystick con cautela e guidare lentamente.



Lieve inclinazione = lento




Inclinazione maggiore = veloce

#### Salita su uno scalino

Avvicinarsi allo scalino su cui si desidera salire formando un angolo retto (in perpendicolare).

Fermarsi proprio prima dello scalino e rallentare dopo che le ruote anteriori lo hanno superato.

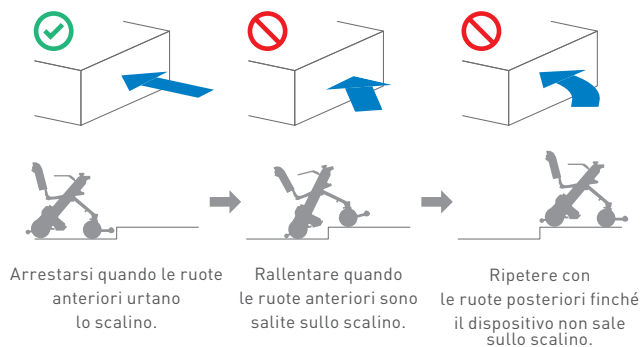

## 3. Sblocco dei freni

In alcune situazioni può essere necessario controllare il dispositivo senza accenderlo e utilizzando il joystick: è la modalità freewheel, che si può praticare con le due leve rosse di sblocco dei freni.

Spegnere il dispositivo. Abbassare entrambe le leve di sblocco dei freni sotto la seduta.



Solleverle entrambe le leve di sblocco per reinnestare i freni successivamente.



Non rilasciare i freni su un pendio. Rilasciare i freni solo su una superficie piana e in caso di emergenza dopo aver spento il dispositivo. Dopo aver spostato manualmente il dispositivo con i freni sbloccati, sollevare le due leve di sblocco per bloccare nuovamente i freni.

## 4. Istruzioni di chiusura

Il modello F non è pieghevole.



- Eseguire la chiusura del dispositivo su una superficie piana e livellata onde prevenire il rischio di incidenti.
- Chiudere il dispositivo con i freni inseriti onde prevenire il rischio di movimenti inaspettati con conseguenti incidenti.
- Quando si tiene il dispositivo, afferrare soltanto l'impugnatura e il componente come indicato nella foto, onde evitare il rischio di lesioni personali dovuto all'impigliamento della mano nel dispositivo.



1 Inclinare in avanti lo schienale verso la seduta.



2 Posizionare il dispositivo sostenendo il pedale.



Sostenendo il pedale che collega le due rotelle anti-ribaltamento si impedisce che il dispositivo si muova quando è chiuso.



C'è il rischio di lesioni personali dovuto all'impigliamento del piede sotto al pedale quando si chiude il dispositivo.

3 Premere il tasto di sblocco



Il tasto di sblocco si trova sul lato anteriore della protezione laterale destra. Mantenere il dispositivo in questa posizione con il tasto di sblocco premuto.

4 Tirare il tubo del telaio del sedile verso l'alto.



Afferrare il tubo del telaio sul retro del sedile e tirarlo verso l'alto mentre si tiene premuto il tasto di sblocco.



Quando il dispositivo inizia a chiudersi, togliere la mano dal tasto di sblocco.

5 Chiudere il dispositivo.



Chiudere il dispositivo portandolo nella posizione in cui si sente un clic. Infine, spingere delicatamente verso il basso il tubo del telaio del sedile ancora una volta per accertare che il dispositivo sia correttamente bloccato e non si apra.



Una volta chiuso, assicurarsi che il dispositivo sia correttamente bloccato per prevenire il rischio che si apra accidentalmente.



## 5. Apertura del dispositivo



- Eseguire l'apertura del dispositivo su una superficie piana e livellata.
- Aprire il dispositivo con i freni inseriti.
- Durante l'apertura del dispositivo, afferrare soltanto l'impugnatura e il componente come indicato nella foto.

### 1 Posizionare il dispositivo sostenendo il pedale.



Sostenendo il pedale che collega le due rotelle anti-ribaltamento si impedisce che il dispositivo si muova quando è aperto.

### 2 Tirare il tubo del telaio del sedile verso l'alto e premere il tasto di sblocco.



Afferrare il tubo del telaio sul retro del sedile e tirarlo verso l'alto per mantenere il dispositivo in posizione.



Premere il tasto di sblocco sulla parte anteriore del bracciolo destro.

**Il tasto di sblocco è stato progettato in modo da poter essere premuto solo quando il tubo del sedile viene tirato verso l'alto.**

### 3 Abbassare il tubo del telaio del sedile.




Abbassare il tubo del telaio del sedile mentre si tiene premuto il tasto di sblocco per aprire il dispositivo. Quando inizia ad aprirsi, togliere le mani dal pulsante.

### 4 Aprire il dispositivo.



portandolo nella posizione in cui si sente un clic.

### 5 Inclinare indietro lo schienale e controllare l'indicatore di blocco.

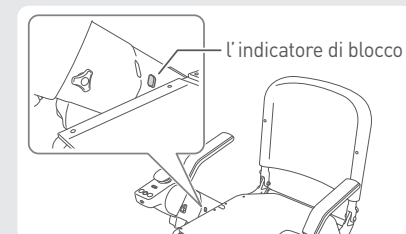

Assicurarsi che l'indicatore di blocco all'interno della protezione laterale destra sia nero.



Dopo l'apertura, assicurarsi che l'indicatore di blocco sia nero per evitare che il dispositivo si chiuda involontariamente durante la guida, provocando un incidente.

## 6. Ricarica della batteria

### 1 Ricarica con la batteria inserita nel dispositivo


Spostare il dispositivo vicino alla presa di corrente e spegnere l'alimentazione.  
Collegare il caricabatterie e il cavo connettore CA.

Inserire la spina del caricabatterie nella presa di corrente. Sull'indicatore del caricabatterie si accende una spia rossa.

Rimuovere il tappo della porta di carica della batteria e inserirvi il cavo connettore CC. porta di carica. Sul caricabatterie si accende un indicatore di alimentazione verde lampeggiante e si avvia la ricarica.

La batteria è completamente carica quando si accende l'indicatore di alimentazione verde fisso.

Scollegare il cavo connettore CC dalla batteria, quindi staccare la spina dalla presa di corrente. Chiudere il tappo della porta di carica della batteria.

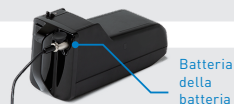

### 2 Ricarica con la batteria non inserita nel dispositivo

Controllare che il dispositivo sia spento e premere il tasto di sblocco della batteria.  
Per rimuovere la batteria afferrare l'impugnatura e tirare.

Collegare il caricabatterie e il cavo connettore CA. Inserire la spina del caricabatterie nella presa di corrente.

Rimuovere il tappo della porta di carica della batteria e inserirvi il cavo connettore CC. Sul caricabatterie si accende un indicatore di alimentazione verde lampeggiante e si avvia la ricarica.

La carica è completa quando l'indicatore di alimentazione del caricabatterie e il LED della batteria diventano verdi fissi.

Scollegare immediatamente il cavo connettore CC dalla batteria e la spina dalla presa di corrente.



- Non toccare la batteria e il caricabatterie durante la carica per evitare ustioni.
- Ricaricare della batteria all'interno.
- Utilizzare soltanto la batteria e il caricatore previsti per il dispositivo.

## 7. Risoluzione dei problemi

In caso di determinati problemi con il dispositivo, sul display apparirà un codice di errore. Se viene visualizzato un errore non elencato o il problema persiste anche se si è tentato di risolverlo secondo le istruzioni, contattare il proprio rivenditore o il servizio clienti.

Comportamento del dispositivo	Codice errore	Causa	Risoluzione
Appare l'icona mostrata a destra.		Il controller viene utilizzato con il dispositivo chiuso.	Sbloccare il dispositivo e riaccenderlo.
		Il joystick non è in posizione neutra all'accensione del dispositivo.	Riaccendere il dispositivo senza toccare il joystick.
		Le leve dei freni sono disinnestate.	Bloccare i freni e riaccendere il dispositivo.
		Il caricabatteria è stato collegato a dispositivo acceso oppure il dispositivo è stato acceso mentre si collegava il caricabatteria.	Scollegare il caricabatterie dalla batteria.
		Il livello di carica della batteria è basso.	Ricaricare la batteria.
La velocità massima diminuisce.		La temperatura della batteria è diminuita notevolmente.	Conservare la batteria a temperatura ambiente o almeno a una temperatura ambiente superiore a 0°C (32°F) finché non supera la temperatura di 0°C (32°F).
Recupera la velocità massima.		La temperatura della batteria è superiore a 0°C (32°F).	
Appare l'icona mostrata a destra.		Il livello di batteria della smart key è basso.	Sostituire la batteria della chiave intelligente.
Il dispositivo non si accende. Il display LED non si illumina.	N/A	Il livello di carica della batteria è basso.	Ricaricare la batteria.
		La batteria non è completamente inserita nel vano batteria sulla base unità posteriore.	Inserire la batteria fino in fondo. Rimuovere la batteria e reinserirla dopo 10 secondi.
		Il connettore del cavo sul retro del sedile è scollegato.	Collegare il connettore del cavo.